


Форм-карта зубов Ivoclar Vivadent


Ivocryl

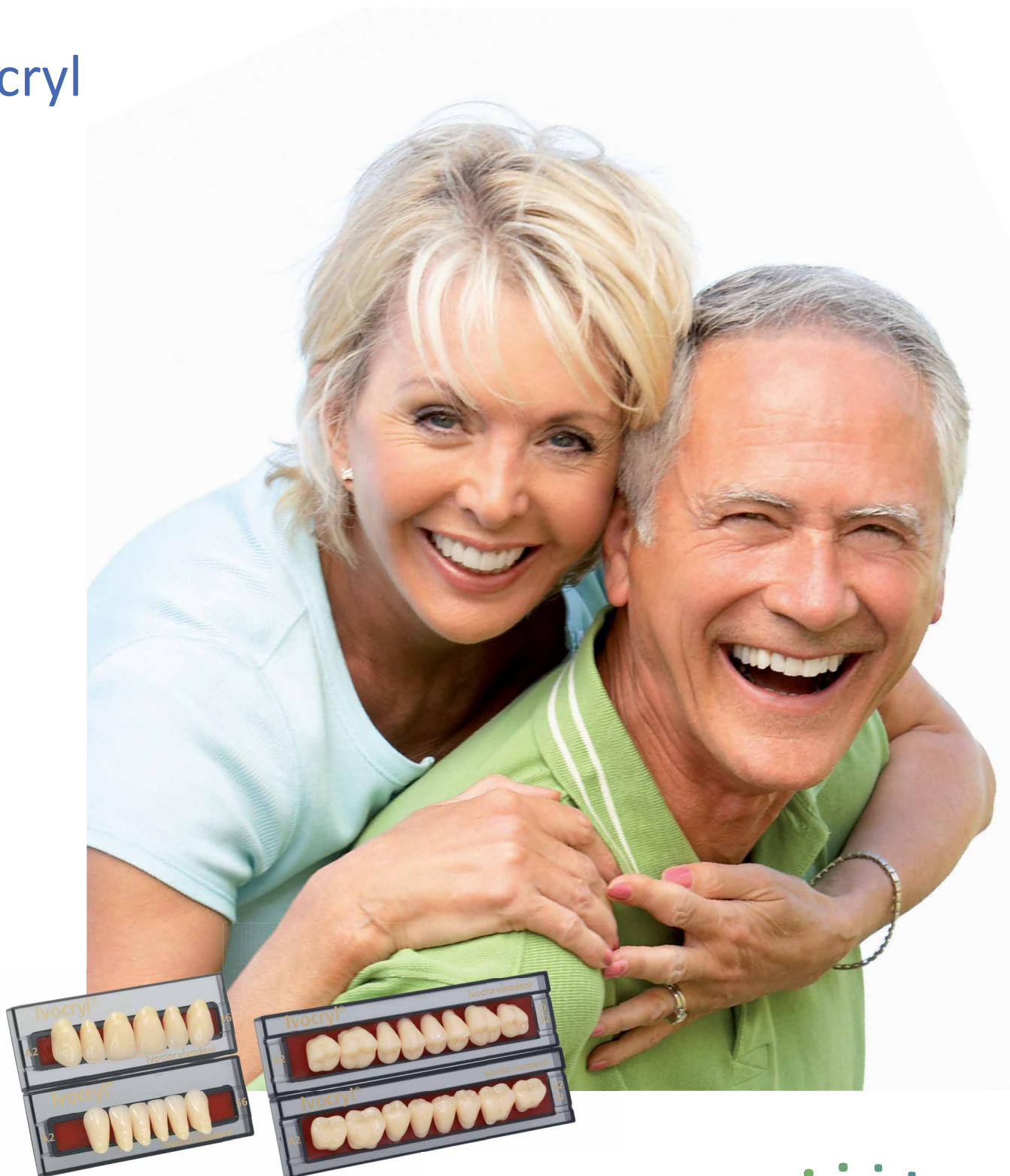


Ivocryl

Верхние фронтальные зубы


Овальные

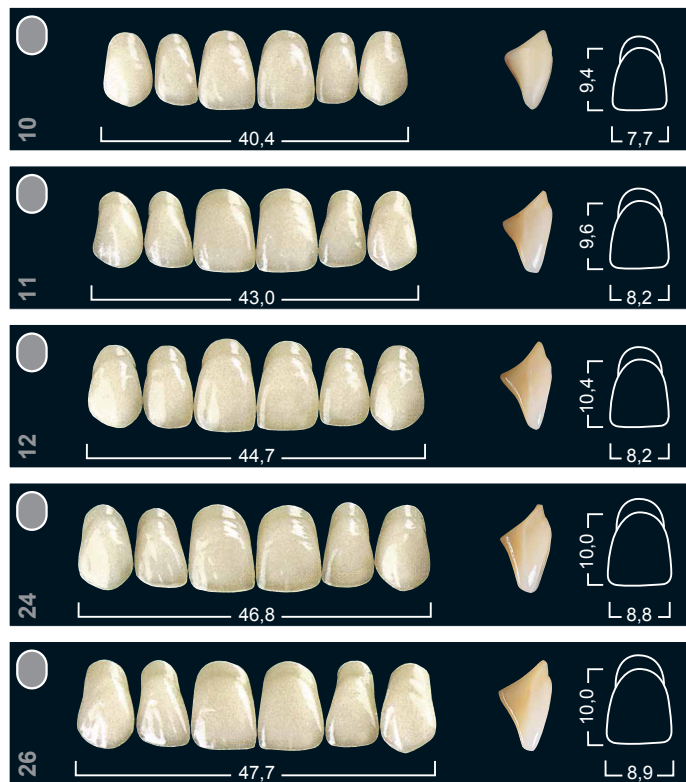

Треугольные

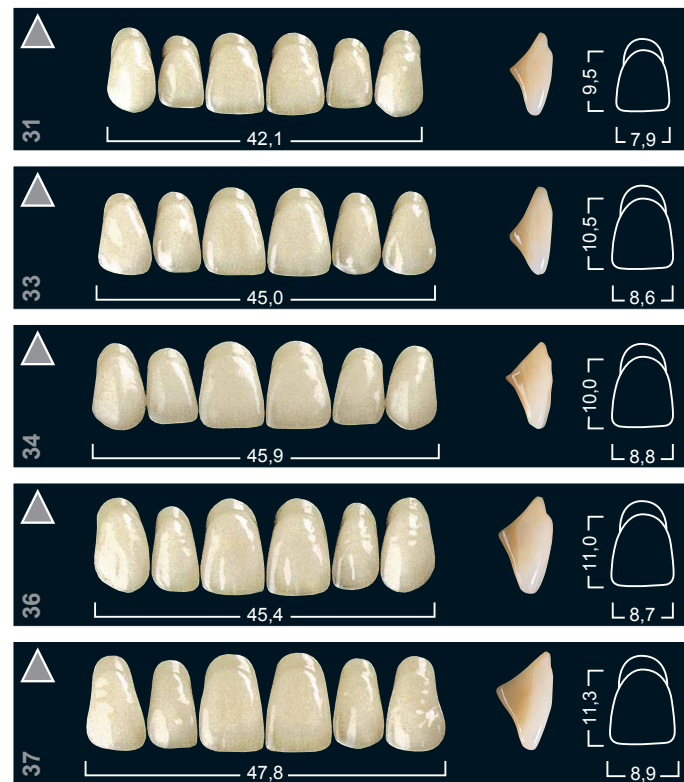

Прямоугольные

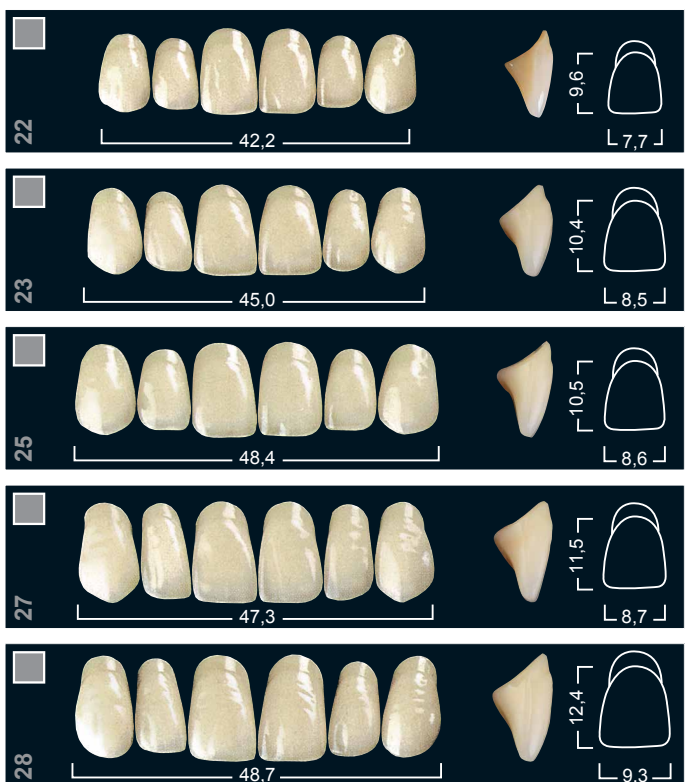

Критерии выбора

Существует множество методов выбора формы зубов, к которым можно отнести форму головы, строение тела и мужской или женский тип.

Однако, дополнительно к этому, если информация о размере, форме и расположении зубов полностью отсутствует, за исходные данные можно принять форму верхней челюсти. Из большого числа форм верхней челюсти принципиально можно выделить три основных типа:

- овальная
- треугольная
- прямоугольная

Верхние фронтальные зубы Ivocryl по их анатомическому строению подразделяются на три основные группы:

Овальная форма зубов

Эта группа характеризуется сильными изгибами, которые проявляются, прежде всего, в выраженном лабиальном изгибе. Овальная форма альвеолярного гребня чаще всего встречается в случаях с глубоким прикусом.

Треугольная форма зубов

Эта группа отличается узкими зубами, с сужающейся в цервикальной области формой коронковой части. Вертикальный лабиальный изгиб выражен средне. Центральный резец имеет треугольную форму. Альвеолярный гребень также имеет треугольную форму и указывает на вероятность перекрестного прикуса.

Прямоугольная форма зубов

Такие зубы имеют скорее прямоугольную форму. Центральный резец доминирует. Вертикальный лабиальный изгиб выражен слабо. Альвеолярный гребень имеет выраженную прямоугольную форму и указывает на ортognатический и прикус.

Нижние фронтальные зубы

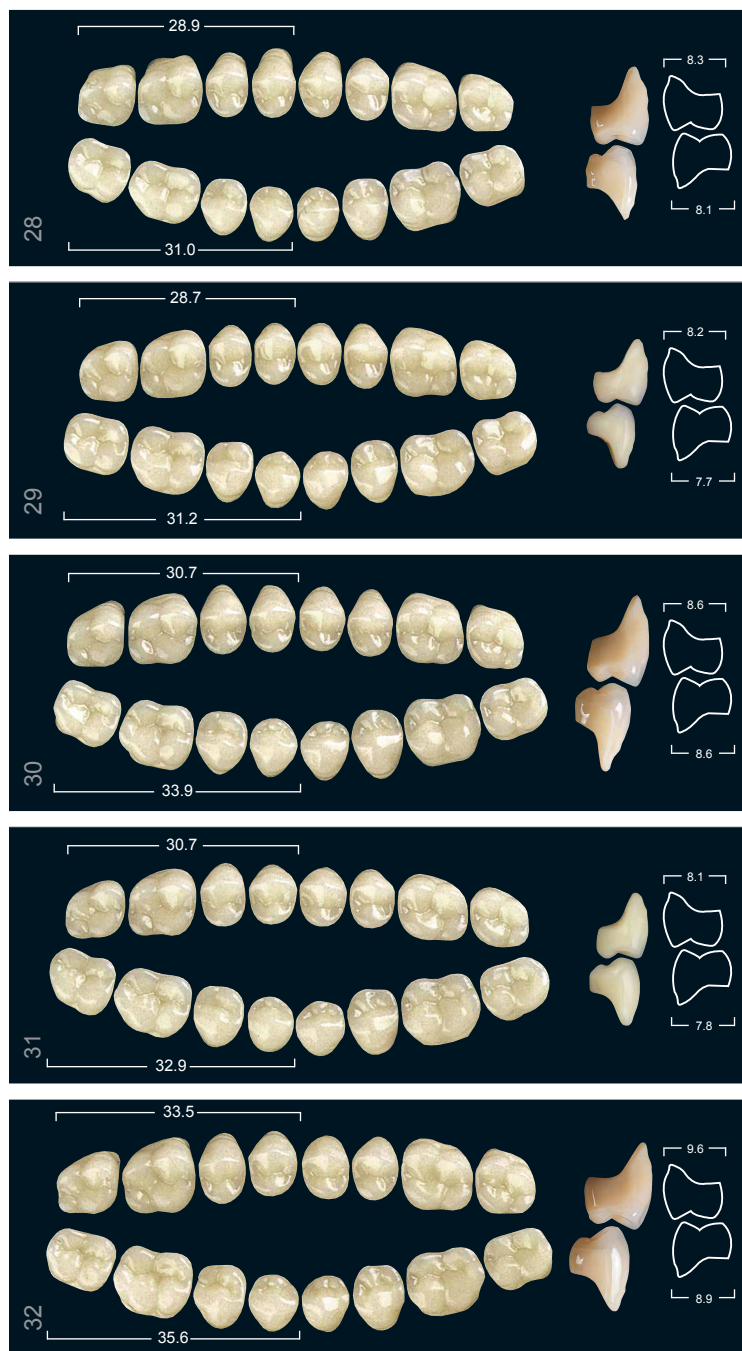
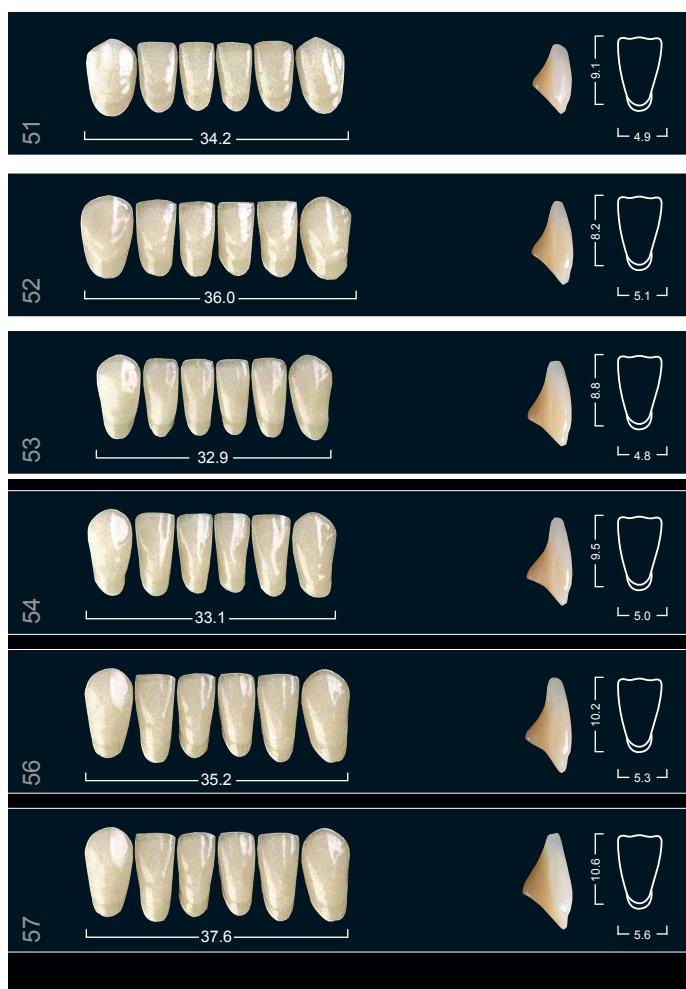


Таблица комбинирования

Форма	Фронтальные зубы		Боковые зубы
	Верхние	Нижние	
○	10	51/53	28/89
	11	51/53	28/29
	12	52/56	30
	24	52/56	30
	26	52/56	30/32
△	31	53/54	28/29/31
	33	52/56	30/32
	34	52/56	30
	36	54/56	30/32
	37	56/57	30/32
■	22	54	28/31
	23	56	30/32
	25	57	32
	27	54/56	32
	28	57	32

Формы фронтальных зубов 10, 23, 25, 27 и 28, а также боковых зубов 29 и 31 выпускаются только в цветах Bleach и A-D.

Формы поставки

	Название линии зубов	Chromascop	A-D
Фронтальные	Ivocryl	539460	630598
Боковые	Ivocryl	539610	630599

Определение цвета

Выбор цвета для пациента должен производиться при определенных условиях освещенности (интенсивность света должна соответствовать 5500 градусов К) или при дневном свете.

Для оптимального определения цвета зуба по шкале A-D, Bleach или Chromascop в Вашем распоряжении находится соответствующая расцветка. Зубы расцветки Ivocryl соответствуют по материалу и расположению слоев оригинальным зубам Ivocryl. Таким образом, отклонения цвета сводятся к минимуму. Выбор цвета может также осуществляться с помощью универсальных расцветок A-D, Bleach или Chromascop.

Комплект расцветок (16 и 4 цвета)		628587
Базовая расцветка (16 цветов)		628623
Цвета Bleach (4 цвета)		628605
Расцветка Ivocryl A-D		630535
Шкафы для зубов		
Z4 (44 x 44,5 x 10,5 см)	4	540307
Z6 (44 x 44,5 x 15 см)	6	540308
Z12 (44 x 44,5 x 29 см)	12	540309
Ящик для шкафа		539132
Вставка в ящик	гарнитур 6 шт.	541651
	гарнитур 8 шт.	541652



CE 0123
ISO 22112 2005

Изображения и данные не являются гарантией свойств.

Отпечатано в РФ

© Ivoclar Vivadent AG, Шаан/Лихтенштейн

Производитель:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL 9494 Schaan
Furstentum Liechtenstein
Tel.: +423 / 235 35 35
Fax: +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

 **STOMATORG**

Стоматорг – официальный дистрибьютор продукции Ivoclar Vivadent в России.
+7 (495) 620-97-34 (33)
shop.stomatorg.ru
stomatorg.ru