

### Сравнение “Дезминол” с “Аламинол”

Название характеристики	Наименование дезинфицирующего средства:	
	<b>Дезминол</b>	<b>Аламинол</b>
Форма выпуска	Прозрачная (допускается наличие слабой опалесценции и незначительного количества осадка) бесцветная или окрашенная в цвет применяемого красителя жидкость со слабым специфическим запахом или запахом применяемой отдушки	Прозрачная жидкость от синего до зелено-синего цвета, хорошо смешивающаяся с водой
Массовая доля глиоксаля, %	7,0 – 9,0	7,0 – 9,0
Массовая доля ЧАС, %	4,5 – 5,5	4,5 – 5,5
Показатель активности водородных ионов (рН) средства, ед.	2,6 – 5,0	2,6 – 5,0
Срок годности средства, лет	5	3
Срок годности рабочих растворов, суток	30	30

Объект обеззараживания	Режимы обработки (концентрация раб. р-ра – время экспозиции) / стоимость 1 литра раб. р-ра:
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Режимы дезинфекции различных объектов при **бактериальных** (кроме туберкулеза) **инфекциях:**

Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	0,4% – 90 мин. / 1,22 ₹	0,4% – 90 мин. / 1,54 ₹
	0,5% – 60 мин. / 1,53 ₹	0,5% – 60 мин. / 1,93 ₹
	1,0% – 30 мин. / 3,05 ₹	1,0% – 30 мин. / 3,85 ₹
	3,0% – 15 мин. / 9,15 ₹	3,0% – 15 мин. / 11,55 ₹
Санитарно-техническое оборудование	1,0% – 60 мин. / 3,05 ₹	1,0% – 60 мин. / 3,85 ₹
	3,0% – 30 мин. / 9,15 ₹	3,0% – 30 мин. / 11,55 ₹
	5,0% – 15 мин. / 15,25 ₹	5,0% – 15 мин. / 19,25 ₹

#### Режимы дезинфекции различных объектов при **бактериальных** (включая туберкулез) **инфекциях:**

Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	2,5% – 120 мин. / 7,63 ₹	2,5% – 120 мин. / 9,63 ₹
	3,0% – 90 мин. / 9,15 ₹	3,0% – 90 мин. / 11,55 ₹
	5,0% – 60 мин. / 15,25 ₹	5,0% – 60 мин. / 19,25 ₹
Санитарно-техническое оборудование	2,5% – 150 мин. / 7,63 ₹	2,5% – 150 мин. / 9,63 ₹
	3,0% – 90 мин. / 9,15 ₹	3,0% – 90 мин. / 11,55 ₹
	5,0% – 60 мин. / 15,25 ₹	5,0% – 60 мин. / 19,25 ₹

#### Режимы дезинфекции различных объектов при **вирусных** **инфекциях:**

Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт	1,0% – 60 мин. / 3,05 ₹	1,0% – 60 мин. / 3,85 ₹
	1,5% – 30 мин. / 4,58 ₹	1,5% – 30 мин. / 5,78 ₹
	2,0% – 15 мин. / 6,10 ₹	2,0% – 15 мин. / 7,70 ₹
Санитарно-техническое оборудование	1,5% – 60 мин. / 4,58 ₹	1,5% – 60 мин. / 5,78 ₹
	2,0% – 30 мин. / 6,10 ₹	2,0% – 30 мин. / 7,70 ₹

*Режимы дезинфекции различных объектов при инфекциях **грибковой** (кандидозы, дерматофитии) **этиологии**:*

Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов; санитарный транспорт	2,5% – 90 мин. / 7,63 Р	2,5% – 90 мин. / 9,63 Р
	3,0% – 60 мин. / 9,15 Р	3,0% – 60 мин. / 11,55 Р
	5,0% – 30 мин. / 15,25 Р	5,0% – 30 мин. / 19,25 Р
Санитарно-техническое оборудование	2,5% – 90 мин. / 7,63 Р	2,5% – 90 мин. / 9,63 Р
	3,0% – 60 мин. / 9,15 Р	3,0% – 60 мин. / 11,55 Р
	5,0% – 30 мин. / 15,25 Р	5,0% – 30 мин. / 19,25 Р

*Режимы **дезинфекции** изделий медицинского назначения:*

Изделия из металлов, пластмасс, стекла (включая стоматологические инструменты)	3,0% – 60 мин. / 9,15 Р	3,0% – 60 мин. / 11,55 Р
	5,0% – 120 мин. / 15,25 Р	5,0% – 120 мин. / 19,25 Р
Изделия из резин	5,0% – 120 мин. / 15,25 Р	5,0% – 120 мин. / 19,25 Р
	8,0% – 60 мин. / 24,40 Р	8,0% – 60 мин. / 30,80 Р
	10,0% – 30 мин. / 30,50 Р	10,0% – 30 мин. / 38,50 Р

*Режимы **дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой**, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) ручным способом:*

Изделия из металлов, пластмасс, стекла, не имеющих замковых частей и каналов	5,0% – 60 мин. / 15,25 Р	5,0% – 60 мин. / 19,25 Р
Изделия из металлов, пластмасс, стекла и резин, имеющие замковые части или каналы	8,0% – 60 мин. / 24,40 Р	8,0% – 60 мин. / 30,80 Р

*Режимы **дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой**, изделий медицинского назначения, в т.ч. стоматологических инструментов, механизированным способом:*

Изделия из металлов, пластмасс, стекла, резин, в т.ч. стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам	8,0% – 15 мин. / 24,40 Р	8,0% – 15 мин. / 30,80 Р
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------

*Режимы **предстерилизационной очистки** изделий медицинского назначения механизированным способом:*

Изделия, не имеющие замковые части и каналов	0,75% – 10 мин. / 2,29 Р	0,75% – 10 мин. / 2,89 Р
Изделия, имеющие замковые части или каналы	1,0% – 15 мин. / 3,05 Р	1,0% – 15 мин. / 3,85 Р

*Режимы **предстерилизационной очистки** гибких и жестких эндоскопов ручным способом:*

Замачивание эндоскопов	1,5% – 30 мин. / 4,58 Р	1,5% – 30 мин. / 5,78 Р
------------------------	-------------------------	-------------------------