






Средства «Magnolia» по уходу за аспирационными системами

Продукт	Назначение	Способ применения	Спектр действия	Рекомендации
PULI-JET PLUS NEW Дезинфицирующее средство для промывки, очистки и санитарно - гигиенической обработки аспирационной системы				
 <p>Ёмкость: 1 литр</p>	<ul style="list-style-type: none"> После использования слюноотсоса и пылесоса в середине и конце рабочего дня ✓ Не содержит фенол ✓ Не оставляет пятен ✓ Не агрессивен к пластику ✓ Имеет приятный цитрусовый аромат 	<ul style="list-style-type: none"> Для промывки и дезинфекции: приготовить 0,8% раствор (20 мл концентрата на 2,5 л горячей ≈ 50 С° воды) Для промывки: приготовить 0,4% раствор (20 мл концентрата на 5 л горячей ≈ 50 С° воды) Засасывать при помощи устройства для промывки шлангов Pulse Cleaner. Дать действовать в течение ночи или не менее 1 часа Из 1 литра Puli-jet Plus получается 250 литров 0,4% санационного (промывочного) раствора и 125 литров 0,8% дезинфекционного раствора 	<ul style="list-style-type: none"> Очистка Дезинфекция: бактерии, грибки, туберкулёзные возбудители, вирусы (в т.ч. ВИЧ и гепатит) 	<ul style="list-style-type: none"> Используйте резиновые перчатки для изготовления раствора
PULI-JET CLASSIC Антибактериальное средство для промывки и санитарно-гигиенической обработки аспирационной системы				
 <p>Ёмкость: 5 литров</p>	<ul style="list-style-type: none"> После использования слюноотсоса и пылесоса в середине рабочего дня После хирургического вмешательства, для очистки и санационной промывки 	<ul style="list-style-type: none"> Для очистки и санационной промывки: приготовить 5% раствор (100 мл концентрата на 2 л горячей ≈ 50 С° воды) Засасывать при помощи устройства для промывки шлангов Pulse Cleaner Из 1 литра Puli-jet Classic получается 20 литров 5% промывочного раствора 	<ul style="list-style-type: none"> Очистка Антибактериальное действие (дать действовать в течение ночи или не менее 1 часа) 	<ul style="list-style-type: none"> Используйте резиновые перчатки для изготовления раствора
Противопенные таблетки Magnolia для бесперебойной работы аспирационных систем				
 <p>Упаковка: 50 таблеток</p>	<ul style="list-style-type: none"> Каждый день после промывки и дезинфекции аспирационной системы 	<ul style="list-style-type: none"> В конце каждого рабочего дня, после промывки поместить 1 или 2 таблетки в фильтр установки или аспиратора: во время работы жидкость самостоятельно растворит необходимое количество таблеток 1 таблетки хватает в среднем на полный рабочий день 	<ul style="list-style-type: none"> Противопенное действие Антибактериальное действие (обычные таблетки), дезинфекционное действие (дезинфекционные таблетки) 	<ul style="list-style-type: none"> Не удаляйте защитную плёнку: она растворяется в воде Для маленьких фильтров: удалите защитную плёнку, затем разломите таблетку пополам по линии разреза Используйте резиновые перчатки

Средства «Magnolia» для дезинфекции и очистки поверхностей

Eco-Jet 1 Spray Спрей для дезинфекции и очистки поверхностей	Eco-jet 1 Tissue Влажные салфетки для дезинфекции и очистки поверхностей
 <p>Ёмкость: 500 мл</p>	 <p>Упаковка: 160 штук</p>
<ul style="list-style-type: none"> Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая бактерии туберкулёза), патогенных грибов возбудителей кандидозов ✓ Не содержит этиловый спирт! 	<ul style="list-style-type: none"> Обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая бактерии туберкулёза), патогенных грибов возбудителей кандидозов, вируса полиомиелита, вируса иммунодефицита человека, вируса гепатита С ✓ Имеют приятный цветочный аромат ✓ Не содержат этиловый спирт!